

ODDENT[®]

FLUIDO ORAL

Producto Sanitario Clase II b
PATENTE INTERNACIONAL

Indicado para su aplicación en heridas y durante la fase postoperatoria. Diseñado específicamente para garantizar un uso sencillo, rápido y eficaz.

El ácido hialurónico de Elevado Peso Molecular (EPM) se concentra principalmente en las capas más externas del tejido gingival sano, contribuyendo a la función de barrera y a la fuerza de tracción del ligamento periodontal. Su presencia se considera esencial para mantener el tejido gingival sano.

El ácido hialurónico posee diversas propiedades beneficiosas que contribuyen al éxito de un programa de tratamiento gingival e higiene oral. En concreto, el ácido hialurónico puede absorber una cantidad de agua equivalente a 50 veces su peso seco.

Esta característica, junto con su conformación molecular cuando se disuelve en un medio acuoso, permite que el ácido hialurónico actúe como una barrera que impide la penetración de microorganismos y otras toxinas que pueden contribuir a la etiología de la enfermedad periodontal, formando una barrera natural muy eficaz.

Gracias a su acción de barrera protectora, **ODDENT[®] Fluido Oral** ayuda a reducir el dolor, fomenta la reconstitución natural del tejido después de procesos traumáticos como cirugía, implantes, extracción dental, raspado radicular, etc., y promueve la absorción de agua reduciendo el edema y aliviando la inflamación.

ODDENT[®] Fluido Oral

- Contiene como fuente de ácido hialurónico un derivado no animal fabricado biotecnológicamente, de alta pureza y calidad, en forma de sal de sodio de elevado peso molecular.
- Tiene una acción local de duración prolongada.
- Se adhiere a la mucosa debido a la naturaleza especial de la formulación del producto.
- Pueden utilizarlo todos los pacientes sin restricciones, incluidos los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada y los diabéticos.

Indicaciones

Considerando sus características, **ODDENT® Fluido Oral** es un producto especialmente indicado para la protección de la mucosa en caso de:

- Heridas profundas en las encías.
- Zonas inflamadas y/o dolorosas después de traumatismos, tratamiento o cirugía periodontal, extracciones dentales o alisado radicular subgingival.

Instrucciones de uso

Inmediatamente después del tratamiento dental, enjuáguese con 5 ml (utilizando el vaso dosificador), durante 1-2 minutos. Después de la correcta higiene oral, repita el tratamiento 2-4 veces al día, a menos que un profesional sanitario le recomiende lo contrario.

El compuesto está listo para su uso; no diluir.

Composición

Ingrediente principal: Hialuronato de sodio.

Otros componentes: agua, PEG-400, xylitol, propilenglicol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, goma de celulosa, copolímero PVM/MA, polisorbato 20, benzoato sódico, alcohol diclorobencílico, PVA, carbómero (poli-carbófilo), fosfato sódico, fosfato trisódico, lactato sódico, EDTA disódico, glicerofosfocolina, aroma, sacarina de sodio, rojo ácido 33 (CI 17200). (Puede contener hidróxido de sodio, ácido láctico).

Envase

ODDENT® Fluido Oral botella de 50 ml con vaso dosificador CE 0373 incluido.

Contraindicaciones: el uso de **ODDENT® Fluido Oral** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Advertencias y precauciones: no usar el producto en caso de daño visible. Conservar a temperatura ambiente, entre 5°C - 40°C, protegido de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Antes de cerrar el envase después de su uso, eliminar todos los restos de producto. Producto sólo para uso personal. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

Distribuidor:

Fabricante:



Menarini Consumer
Healthcare, SAU
Guifré 724, 08918
Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 462 88 00
www.menarini.es



RICERFARMA S.R.L.



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com

Fabricado en la UE

