

# ODDENT F O R T E

Producto Sanitario Clase II b  
PATENTE INTERNACIONAL

**Indicado para su aplicación en heridas y durante la fase postoperatoria. Diseñado específicamente para garantizar un uso sencillo, rápido y eficaz.**

El ácido hialurónico de Elevado Peso Molecular (EPM) se concentra principalmente en las capas más externas del tejido gingival sano, contribuyendo a la función de barrera y a la fuerza de tracción del ligamento periodontal. Su presencia se considera esencial para mantener el tejido gingival sano.

El ácido hialurónico posee diversas propiedades beneficiosas que contribuyen al éxito de un programa de tratamiento gingival e higiene oral. En concreto, el ácido hialurónico puede absorber una cantidad de agua equivalente a 50 veces su peso en seco. Esta característica, junto con su conformación molecular cuando se disuelve en un medio acuoso, permite que el ácido hialurónico actúe como una barrera que impide la penetración de microorganismos y otras toxinas que pueden contribuir a la etiología de la enfermedad periodontal, formando una barrera natural muy eficaz. Gracias a su acción de barrera protectora, **ODDENT® Forte** ayuda a reducir el dolor, fomenta la reconstitución natural del tejido después de procesos traumáticos como cirugía, implantes, extracción dental, raspado radicular, etc., y promueve la absorción de agua reduciendo el edema y aliviando la inflamación.

## **ODDENT® Forte**

- Contiene como fuente de ácido hialurónico un derivado no animal fabricado biotecnológicamente, de alta pureza y calidad, en forma de sal de sodio de elevado peso molecular.
- Tiene una acción local de duración prolongada.
- Se adhiere a la mucosa debido a la naturaleza especial de la formulación del producto.
- Pueden utilizarlo todos los pacientes sin restricciones, incluidos los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada y los diabéticos.

## Indicaciones

Considerando sus características, **ODDENT® Forte** está especialmente indicado para la protección de la mucosa en caso de:

- Heridas profundas en las encías.
- Zonas inflamadas y/o dolorosas después de traumatismos, tratamiento o cirugía periodontal, extracciones dentales o alisado radicular subgingival.

## Instrucciones de uso

Inmediatamente después del tratamiento dental, aplicar una pequeña cantidad de gel directamente con la cánula en la superficie afectada o, después de lavarse bien las manos, aplicar el gel con el dedo y masajear suavemente la encía hasta que el área afectada esté completamente cubierta. Usar 1-2 veces al día, o cuando se necesite, a menos que su profesional sanitario indique lo contrario.

## Composición

Ingrediente principal: Hialuronato de sodio.

Otros componentes: Agua, xylitol, goma celulósica, alcohol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, glicerofosocolina, fosfato de sodio, PVA, carbómero (policarbofilo), alcohol diclorobencílico, fosfato trisódico, lactato de sodio, hidróxido de sodio. (Puede contener ácido cítrico).

## Envase

**ODDENT® Forte gel oral** tubo de 8 ml.

**Contraindicaciones:** el uso de **ODDENT® Forte** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

**Advertencias y precauciones:** no usar el producto en caso de daño visible. Conservar a temperatura ambiente; protegido de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Antes de cerrar el envase después de su uso, eliminar todos los restos de producto. Producto sólo para uso personal. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

Distribuidor:



Menarini Consumer  
Healthcare, SAU  
Guifré 724, 08918  
Badalona (Barcelona)  
Tel. +34 93 462 88 00  
[www.menarini.es](http://www.menarini.es)

Fabricante:



**RICERFARMA** S.R.L.  
Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT  
[www.ricerfarma.com](http://www.ricerfarma.com)  
Fabricado en la UE

