

ODDENT® FORTE SPRAY ORAL

Como resultado de su actividad formadora de película, restaura las encías sanas y alivia los tejidos bucales inflamados

ODDENT® Forte Spray Oral es un producto sanitario que proporciona una óptima adhesión y protección de la mucosa gingival. Sus propiedades provienen del uso de varios polímeros, calibrados para proporcionar excelentes propiedades mecánicas y de biocompatibilidad. Su composición se caracteriza por la presencia de ácido hialurónico de elevado peso molecular (EPM), que se asemeja al ácido hialurónico natural que se encuentra en el tejido gingival.

El ácido hialurónico de EPM se concentra especialmente en las capas más superficiales del tejido gingival sano, donde contribuye tanto a la función de barrera como a la fuerza de tracción del ligamento periodontal.

En la enfermedad periodontal y otras lesiones tisulares (estados inflamatorios, bolsas gingivales, heridas, etc.), la necesidad de ácido hialurónico por parte de los tejidos aumenta considerablemente (hasta un 200% aproximadamente en comparación con los valores basales), lo que demuestra su valor para el mantenimiento de unas encías sanas.

Los ensayos clínicos demuestran que la disponibilidad de ácido hialurónico exógeno con características similares a las del componente producido de manera natural ayuda a facilitar el proceso natural de reparación y recuperación de los tejidos.

ODDENT® Forte Spray Oral es, por tanto, un producto innovador que aporta un ácido hialurónico de elevado peso molecular con una acción prolongada, fabricado biotecnológicamente. La aplicación de ácido hialurónico proporciona al tejido periodontal un balance hídrico con funciones de curación y reparación aceleradas al prevenir el déficit de ácido hialurónico de EPM gingival natural y potenciar sus efectos. El ácido hialurónico no ejerce ningún efecto farmacológico local o sistémico en la mucosa.

ODDENT® Forte Spray Oral proporciona la máxima adhesión, permitiendo así que el ácido hialurónico (que de lo contrario sería eliminado por el flujo salival constante) permanezca *in situ*.

ODDENT® Forte Spray Oral es extremadamente seguro, no presenta contraindicaciones ni efectos secundarios, y puede ser utilizado sin restricciones por niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada. El perfil de seguridad de **ODDENT® Forte Spray Oral** es especialmente útil cuando está contraindicado el uso de antiinflamatorios. Debido a las propiedades del xylitol, un edulcorante natural que no favorece la aparición de caries ni provoca variaciones significativas en el nivel de azúcar

en la sangre, el producto es apto para diabéticos. No se conocen interacciones con otros medicamentos.

Indicaciones: lesiones severas y dolorosas como úlceras bucales severas, heridas bucales o abrasiones causadas por extracciones de dientes e intervenciones quirúrgicas, etc.

Instrucciones de uso: después de una correcta higiene bucal, aplicar **ODDENT® Forte Spray Oral** de tres a cinco veces al día (después de las comidas principales) durante 3-4 semanas, y continuar hasta que todos los síntomas hayan desaparecido. Se aconseja no comer ni beber durante al menos 30 minutos después de la aplicación.

Cada pulverización garantiza una distribución homogénea y constante del líquido en la superficie de la boca; 1 ó 2 pulverizaciones en el tejido inflamatorio o lesionado. Mantener el frasco en posición vertical.

No se han notificado problemas tras la ingesta accidental del producto.

Composición:

Ingrediente principal: Hialuronato de sodio

Otros ingredientes: Agua, xylitol, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, benzoato de sodio, fosfato de sodio, alcohol diclorobencílico, fosfato trisódico, lactato de sodio, EDTA disódico, alcohol polivinílico, PVP, sacarina sódica, glicerofosocolina, aroma, carbómero (policarbofilo), copolímero PVM/MA. Puede contener ácido láctico, hidróxido de sodio.

Contraindicaciones: el uso de **ODDENT® Forte Spray Oral** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus ingredientes.

Precauciones y advertencias: no utilice el producto si está visiblemente dañado. Conservar a temperatura ambiente, entre 5°C y 40°C; proteger de las fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Antes de cerrar el envase después de su uso, elimine todos los residuos del producto. Producto para uso personal solamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

Distribuidor:



**Menarini Consumer
Healthcare, SAU**
Guifré 724, 08918
Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 462 88 00
www.menarini.es

Fabricante:



RICERFARMA S.R.L.
Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Fabricado en la UE

